
Ändrad hantering av rör med beställning av S-Zink

Kvalitetssäkring av analysen S-Zink har visat att det kan bli för höga mätvärden om inte serum hälls av till ett avhållningsrör efter centrifugering.

Vi rekommenderar därför följande när det gäller provtagning för analys av S-Zink:

Provet ska centrifugeras inom en timme efter provtagning och hällas av till ett avhållningsrör utan tillsats. Provet ska vara hemolysfritt. Om flera rör tas med samma kanyl ska zinkprovet inleda provtagningen för att förhindra eventuell kontaminering av zink från korken.

Vid frågor kontakta SYNLAB tel: 08-123 191 60

Cecilia Gälman
Verksamhetschef
Klinisk kemi

Christian Löwbeer
Överläkare
Klinisk kemi