


Provtagning saliv med Quantisal provtagningskit

Förberedelser

1. Förbered en låda med minst 3 helst 5 provtagningskit med korrekt utgångsdatum där provlämnaren kan välja kit alternativt tilldelas kit (Använd ej skadat eller utgången provtagningskit.)
2. För Drogtester inom vård & behandling ska **ett rör** användas och för Drogtester i arbetslivet ska **två rör** (A och B-rör) användas.
3. Använd alltid nya handskar inför varje provtagning och hantering av provet.

Provtagning

1. Säkerställ provlämnarens identitet genom en giltig ID-handling (körkort, ID-kort, pass). Informera provlämnaren om syftet med testet och att provet analyseras hos SYNLAB i Täby och beställaren av testet får resultatet. Provlämnaren ska instrueras och ha uppsikt över provet under hela processen, dvs provtagning till plomberat provrör.
2. Säkerställ att provlämnaren inte har ätit, druckit eller rökt på 10 minuter innan provtagningen eller har något i munhålan. Vid osäkerhet be provlämnaren att skölja munnen och vänta i minst 10 minuter innan provtagning.
3. Instruera provlämnaren att noggrant tvätta händerna innan provtagningen för att undvika eventuell kontaminering av prov.
4. Fyll i remiss i den elektroniska blanketten. **OBS!** Notera alla intagna läkemedel senaste två veckor på remissen.
5. Provlämnaren väljer eller tilldelas kit.
6. Provtagaren öppnar provtagningskit/kiten med spateln och placerar spateln under tungan och ber provlämnaren stänga munnen. Vid arbetsplatstester kan man med fördel placera både A- och B-provet i munnen samtidigt på varsin sida under tungan.
7. Instruera provlämnaren att hålla spateln på plats med ett lätt bitt runt skaftet och hålla huvudet lutat svagt ned mot golvet för att underlätta salivinsamlingen. Provlämnaren får inte blåsa eller tugga på spateln, inte prata eller öppna munnen under provtagningen. Samla saliv tills hela indikatorn blir blå (ca 2-10 minuter).

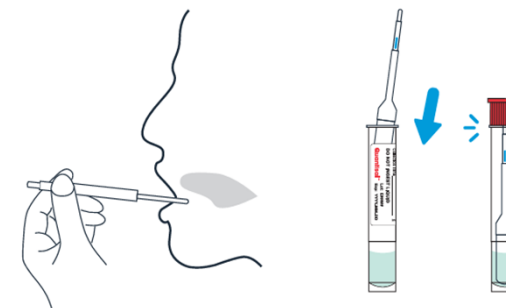



Provtagning saliv med Quantisal provtagningskit

8. Har inte indikatorn blivit blå inom 10 minuter. Är spateln mjuk och rejält blöt kan den skickas efter 10 minuter. Är man osäker om spateln är tillräckligt blöt kan provtagningen med nytt kit påbörjas direkt.
9. Provtagaren öppnar provröret/rören med blågröna bufferten och stoppar ner en spatel i varje rör. Se till att inte spilla lösningen från röret/rören.
10. Förslut röret med den röda proppen och tryck på korken tills du hör ett klick. Säkerställ att inte röret läcker genom att vända röret ett par gånger.
11. Granska rören, de ska inte innehålla några partiklar av matrester eller tobak.
För prover inom drogtester i arbetslivet ska båda rören ska färgmässigt stämma överens.
12. Märk provröret/provrören med streckkod så att de plomberas tvärs över locken i provlämnarens närvaro. Fäst etiketterna ordentligt på rören och tryck till dem med handen.
Det är olika etiketter för drogtester inom vård & behandling och för Drogtester i arbetslivet.
13. Skanna etikettens streckkod till remissblankettens fält för Provid eller skriv in koden manuellt. För drogtester i arbetslivet ska bägge rören skannas.
14. För drogtester i arbetslivet: Provlämnaren ger sitt samtycke till provtagning och analys av markerade analyser via signatur med BankID/på skärmen/på papper. I annat fall går det inte att skicka remissen och provet analyseras inte.
15. För drogtester i arbetslivet ska Provlämnaren få möjlighet till en remisskopia. Om beställaren har Patientportalen kan den ses/skrivas ut där annars skriv ut den från remissen.
16. Placera röret/rören i en säkerhetspåse per provlämnare. Förslut påsen ordentligt.
17. Skicka provet för analys så snart som möjligt efter provtagning.
Om transport inte kan ske samma dag ska provet förvaras i kyl vid 2 - 8°C. Transport kan ske utan kyla.
Vid transport med svarspost ska provet lämnas till postombud.
18. Material beställs via normala kanaler.

