

## Instruktion och provblankett för provtagning av autoklav med sporprov (använd när ni har fått ampullen)

Fyll i blanketten

Provtagningsdatum: \_\_\_\_\_

Kundnummer: \_\_\_\_\_

(om ni redan har det, annars får ni ett kundnummer när ni får ert första svar från oss)

Mottagning: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Gatuadress: \_\_\_\_\_

Postnummer: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-postadress: \_\_\_\_\_

Organisationsnummer: \_\_\_\_\_

Placera sporampullerna liggande på olika ställen i autoklaven. Starta det program ni brukar använda vid autoklivering.

När autokliveringen är klar och ampullerna har svalnat, märk sporampullerna med de små nummeretiketter som är medskickade.

Lägg de autoklaverade och **märkta** sporampullerna tillsammans med denna blankett i det bifogade returkuvertet och posta brevet.

### Svarsrutin:

Prov besvaras normalt inom en vecka efter provets ankomst till laboratoriet.