

## Instruktion och provblankett för provtagning av hetluftssterilisator med sporprov (använd när ni fått stripsen)

Fyll i blanketten

Provtagningsdatum: \_\_\_\_\_

Kundnummer: \_\_\_\_\_

(om ni redan har det, annars får ni ett kundnummer när ni får ert första svar från oss)

Mottagning: \_\_\_\_\_

Kontaktperson: \_\_\_\_\_

Gatuadress: \_\_\_\_\_

Postnummer: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Telefonnummer: \_\_\_\_\_

E-postadress: \_\_\_\_\_

Organisationsnummer: \_\_\_\_\_

### Ta inte ur stripsen från pappret.

Placera stripsen på olika ställen i hetluftssterilisatorn. Starta det program ni brukar använda och kör programmet som vanligt.

När steriliseringen är klar och stripsen har svalnat, märk stripsen med de små nummeretiketter som är medskickade.

Lägg de **märkta** stripsen tillsammans med denna blankett i det bifogade returkuvertet och posta brevet.

### Svarsrutin:

Prov besvaras normalt inom en vecka efter provets ankomst till laboratoriet.