

## Rörordning vid provtagning

De flesta rör innehåller någon slags tillsats i form av lösning, pulver eller sprejad antikoagulantia. När provtagningsnålen perforerar korken på olika rör med olika tillsatser kan rören kontaminera varandra och därmed provet.

**Blododling först om aktuellt, sedan i följande ordning;**

Koagulationsrör tillsats Natrium-citrat	
Rör utan tillsats eller med koagulationsaktivator / gel	
Tillsats Litium-heparin	
Tillsats Litium-heparin med gel	
Tillsats Natrium-heparin	
Tillsats EDTA	
Tillsats Natrium-fluorid/Kaliumoxalat	
SR rör	
FC-Mix, rör till glukos	